



Goldeneye
THE MICROPIGMENTATION COMPANY

Airtronic

Dispositivo de micropigmentación



Manual



100 PREMIUM QUALITY





Piezas incluidas

- 1 Unidad Airtronic de Goldeneye
- 1 Fuente de alimentación
 - Entrada: 100 – 240 V ~ 50-60 Hz
 - Salida: 12 VDC, máx. 1000 mA 12 W máx.
- 1 Dermógrafo de aire
- 1 Cable para pieza de mano
- 1 Conmutador de pedal

Instrucciones de seguridad



Antes de utilizar el producto por primera vez, lea el manual de instrucciones. Consérvese para cualquier consulta posterior o para otros usuarios.



En caso de daño, la unidad no debe utilizarse y se deberá desconectar de la red inmediatamente.



No debe utilizarse en espacios húmedos.




Solo para uso interior.

Temperatura de funcionamiento entre 15 - 40 °C.



Puesta en marcha

- Conecte a la corriente el cable de alimentación (12 VDC, 1000 mA) que se incluye en la fuente de alimentación.
- Conecte el Airtronic de Goldeneye al conector de alimentación en la parte posterior de la unidad (1).
- Conecte el cable de la pieza de mano en la parte posterior de la unidad (2).
- Conecte el cable del conmutador de pedal en la parte posterior de la unidad (3).
- La unidad estará lista para ser utilizada.

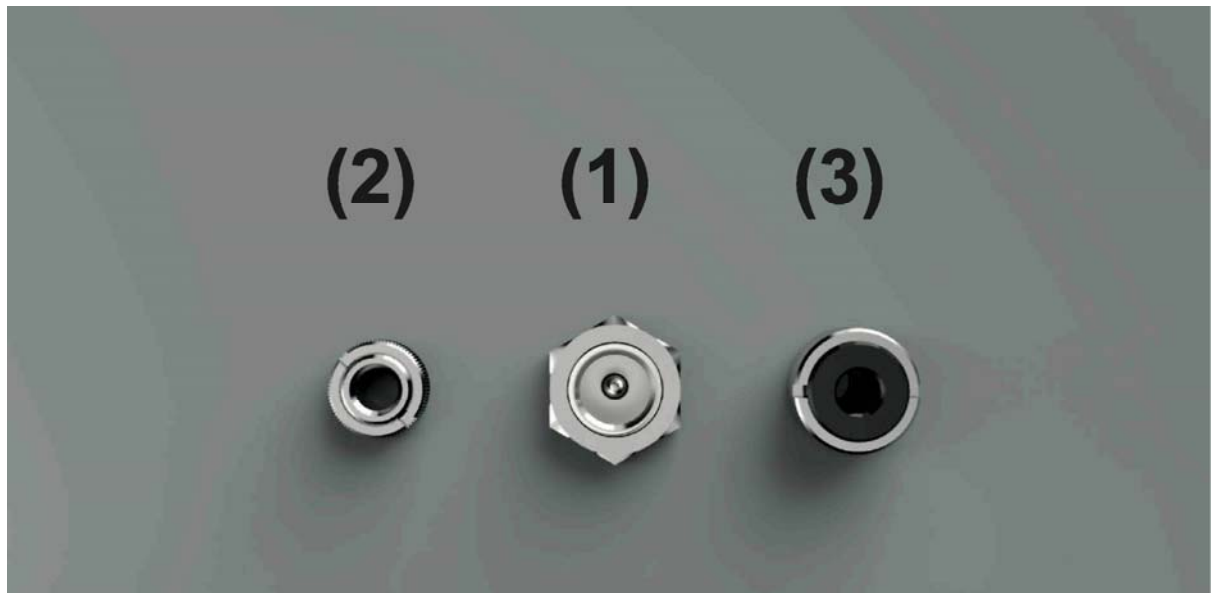

Instrucciones de uso

- Pulse On/Off (encender/apagar) para activar el dispositivo.



- Pulse inicio/parada para que la pieza de mano se ponga en marcha.



- Pulse más/menos para cambiar la velocidad.



Instrucciones de uso

- Pulse inicio/parada o utilice el conmutador de pedal para pausar el trabajo.



- Pulse On/Off (encender/apagar) para apagar el dispositivo.





Datos técnicos

Clase de protección: 2
Voltaje: 12 VDC
Potencia: 12 VA

Transporte / almacenamiento / condiciones de uso e instrucciones:

Transporte únicamente en el embalaje original del fabricante.
Temperatura de transporte y almacenamiento: entre 0 °C y 50 °C.
Temperatura de funcionamiento: entre 15 °C y 40 °C.
Humedad relativa: máx. 90 %, sin condensación. Evítense cambios bruscos de temperatura, podrían causar condensación en el dispositivo.
Actívese el aparato solo con una temperatura óptima.

Instrucciones de eliminación

Deseche el embalaje, el equipo, los cables y los accesorios de manera respetuosa con el medio ambiente.
Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado de los residuos domésticos.



Goldeneye
THE MICROPIGMENTATION COMPANY